



## Tjekliste ved sterilisation

- Instrumenter skal være rengjorte, desinficerede og tørre før autoklavering
- Beskadigede og defekte instrumenter skal kasseres
  - de kan føre til "spredning" af rust
- Placer instrumenter, så de ikke berører hinanden
- Læg ikke instrumenter direkte på bakkerne
- Spejle lægges med glasset nedad
- Instrumenterne må ikke stables
- Autoklaveposer lægges, så papirsiden er fri, og dampen kan trænge igennem
- Husk dato og årstal på pose (evt. initialer for den, der pakker)
- Husk god afstand mellem bakker og kassetter

## Anbefalet kontrol af klasse B autoklaver

Ifølge hygiejnestandarden DS2451-12

- Anvend en procesindikator – fx autoklavetape ved hver kørsel.
- Anvend dagligt en kemisk indikator fx Comply Sterigage (varenr. 65995) eller MELAcontrol Helixtester (varenr. 75114) i første kørsel om morgenen.
- Test autoklaven hver måned med biologisk indikator fx Attest fra 3M (varenr. 34757) og 3M Incubator (varenr. 58916) eller sporeprøver fra fx Statens Seruminstitut.
- Før en omhyggelig logbog over testresultaterne.

